

PELIF®

(経皮的腰椎椎体間固定術)



経皮的全内視鏡を使用した最小侵襲で
安全性も確保された腰椎椎体間固定術です。
outer sheath cutter等により
効率的に移植母床を作製できます。
Lレトラクトスライダーにて各種メーカーのcageを
経皮的で安全に設置できます。
posterolateral approachによる
経皮的全内視鏡下椎間板ヘルニア切除術と
TLIF等の腰椎椎体間固定術に習熟していれば、
この手技は難しくはありません。

写真は実物大では御座いません。予告無く変更する場合がございます。

販売名：フェジ鉗子

一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具

製造販売届出番号：21B2X10011000001

販売名：レトラクトスライダー

一般的名称：脊椎手術用器械

製造販売届出番号：21B2X10011000005

販売名：アウターシースカッター

一般的名称：脊椎手術用器械

製造販売届出番号：21B2X10011000004

販売名：トレフィンセット

一般的名称：脊椎手術用器械


製造販売届出番号：21B2X10011000006

クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社

TEL：0575-22-0052

Vol.1-2022.10

outer sheath cutter[®]

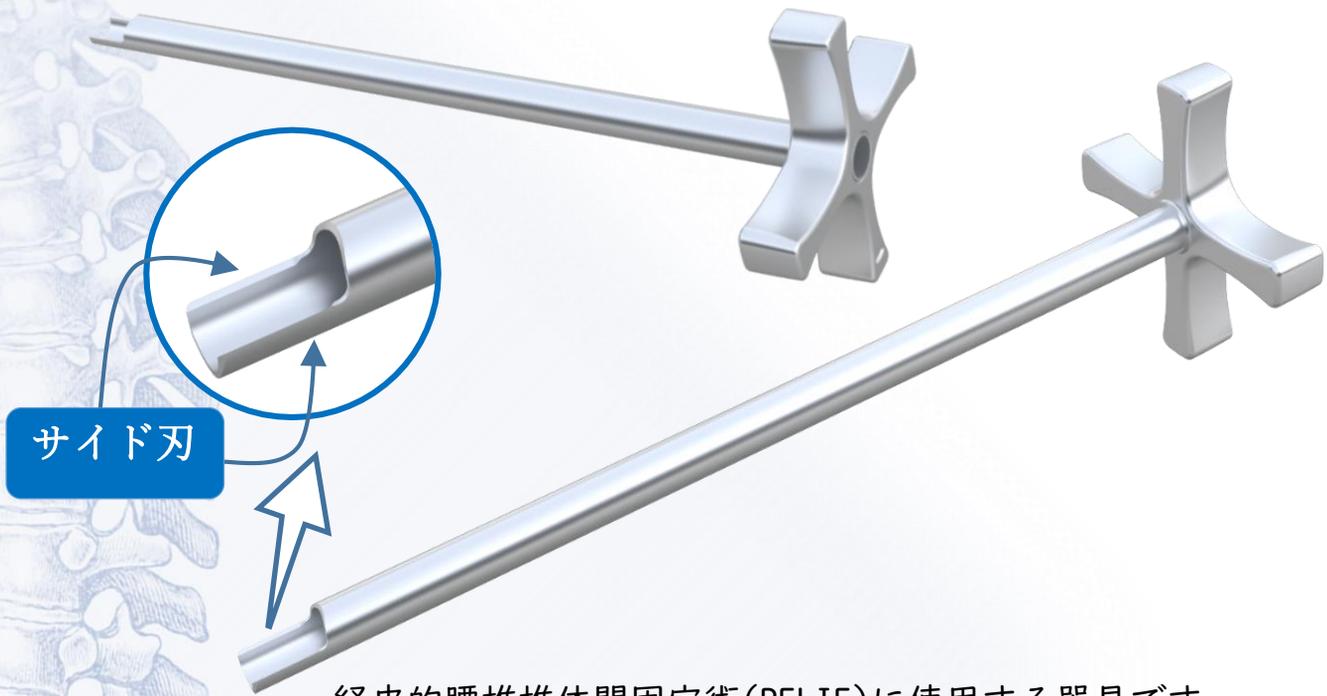

経皮的腰椎椎体間固定術(PELIF)に使用する器具です。経皮的全内視鏡の外筒としての機能と、鏡視しながら手元ハンドル部を持って回旋させたり、振ったりして先端beakのサイド刃で終板を剥離する機能を併せ持ちます。小侵襲で容易に安全に椎間板切除ができます。

写真は実物大では御座いません。予告無く変更する場合がございます。

ODタイプ	OD	ID	Length	製造販売届出番号
7.5	7.5mm	6.5mm	170mm	21B2X10011000004
8.0	8.0mm	7.0mm	170mm	

各種メーカーの経皮的全内視鏡に対応したサイズで作製できます。

販売名：アウターシースカッター
一般的名称：脊椎手術用器械
クラス分類：一般医療機器
製造販売業者：足立工業株式会社
TEL：0575-22-0052
Vol.2-2022.1

Lレトラクトスライダー®



経皮的腰椎椎体間固定術(PELIF)に使用する器具です。

経皮的全内視鏡用外筒に挿入可能で、経皮的にケージを挿入する際にexiting nerve rootを確実に保護しながら椎間へのガイドとなります。

ケージを「」形に囲むことで様々なサイズのケージに対応し、適度にたわんでスライダーとして機能します。外面の角は丸みを帯びた形状としており、神経への傷害を防ぎます。



抜去器

写真は実物大では御座いません。予告無く変更する場合がございます。

タイプ	サイズ	Length
右	小	200mm
	大	200mm
左	小	200mm
	大	200mm
抜去器	-	200mm

販売名：レトラクトスライダー

一般的名称：脊椎手術用器械

製造販売届出番号：21B2X10011000005


クラス分類：一般医療機器

製造販売業者：足立工業株式会社

TEL：0575-22-0052

Vol.0-2021.9

トレフィンセット

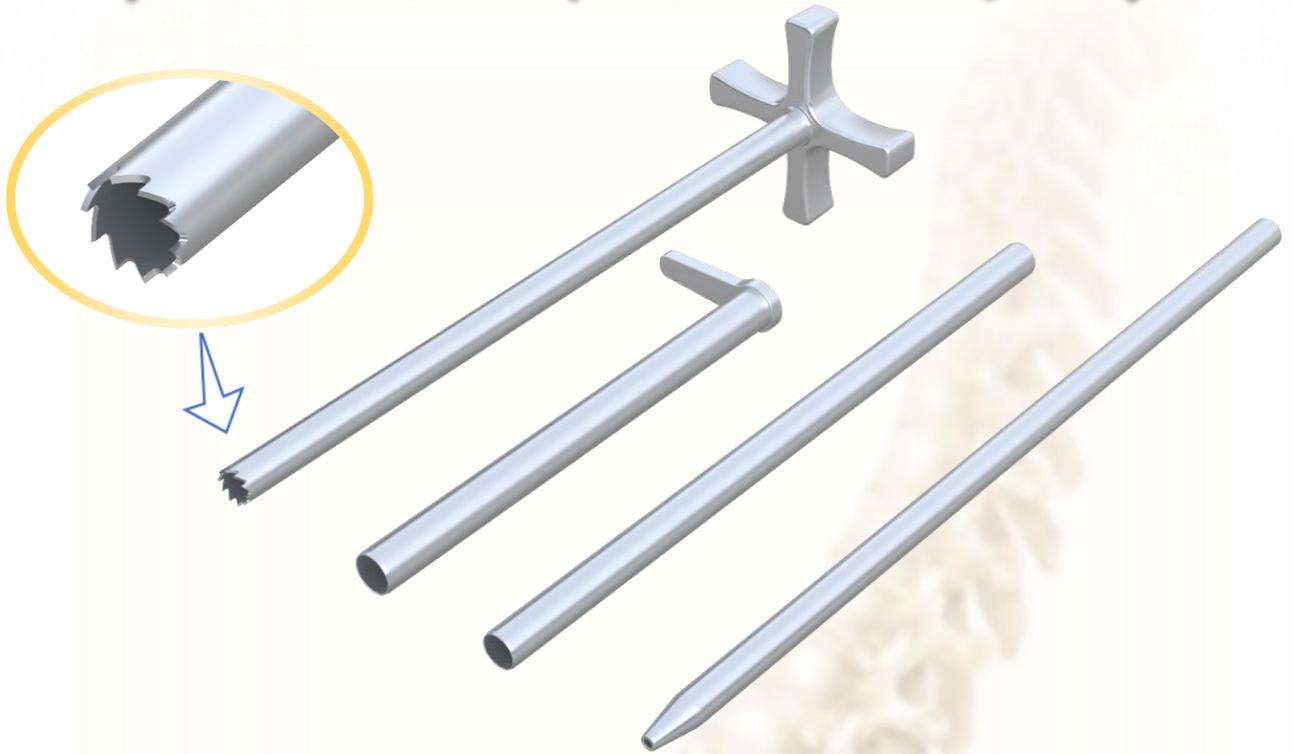

腰椎椎体間固定術で、移植骨を経皮的に採取する際に使用します。後方小皮膚切開から上殿皮神経を傷害しないように、腸骨から骨採取が可能です。ハンマーで打ち込んだり回転させたりして内板と外板の間から海綿骨を十分に採取できます。



シャープダイレーター



シリアルダイレーター



外筒



トレフィン

写真は実物大では御座いません。予告無く変更する場合がございます。

品名	OD	Length	製造販売届出番号
シャープダイレーター	6.4mm	190mm	21B2X10011000006
シリアルダイレーター	7.5mm	150mm	
外筒	8.5mm	105mm	
トレフィン	7.5mm	170mm	

販売名：トレフィンセット
 一般的名称：脊椎手術用器械
 クラス分類：一般医療機器
 製造販売業者：足立工業株式会社
 TEL：0575-22-0052
 Vol.0-2021.9

Working instruments through the outer sheath (for PELIF®)

PELIF(経皮的腰椎椎体間固定術)に使用する器具です。経皮的全内視鏡用の外筒に直接挿入して使用します。

outer sheath cutterでは届かない所の椎間板も切除できます。

片側進入の場合やL5-S1高位で特に有用です。



写真は実物大では御座いません。予告無く変更する場合がございます。

商品名：可屈曲鋭匙	Type	Jaw Length	OD	Working Length
	Up	5mm	5mm	250mm
	Down			
	Up	8mm		
	Down			
	Up	11mm		
	Down			

販売名：フェジ鉗子
 一般的名称：再利用可能な内視鏡用非能動処置具
 製造販売届出番号：21B2X10011000001
 クラス分類：一般医療機器
 製造販売業者：足立工業株式会社
 TEL：0575-22-0052